

# Diacoll

die schnelle Blutstillung für die Dialyse



- schnelle und zuverlässige hämostyptische Wirkung
- weiches schwammartiges Vlies
- ist einfach und schnell anzuwenden
- überzeugt durch eine ausgezeichnete Verträglichkeit
- steigert die Lebensqualität der Patienten

### *Produkt*

Diacoll ist ein Hämostyptikum, das als reines natives Kollagen aus Schweinehaut gewonnen wird. Kollagen ist ein bei Menschen und Tieren vorkommendes Strukturprotein des Bindegewebes. Im menschlichen Körper ist Kollagen mit über 30% das meist verbreitete Eiweiß und bildet den wesentlichen Bestandteil von Knorpel, Sehnen, Bändern und Haut.

### *Indikation*

Der Einsatz von Diacoll ist indiziert, wenn venöse, kapillare Blutungen, diffuse Sickerblutungen oder Parenchymlutungen gestillt werden müssen.

Diacoll ist kontraindiziert bei infizierten Wunden und bei gleichzeitigem Gebrauch von Methylmethacrylat-Kleber.

### *Wirkung*

Diacoll zeichnet sich durch eine sehr schnelle und zuverlässige hämostyptische Wirkung aus. Es bietet eine hohe Absorption und kann auch als Trägermaterial für Antibiotika oder gerinnungsaktive Substanzen verwendet werden. Bei längerem Verbleiben auf der Wunde wird Diacoll rückstandsfrei resorbiert. Es werden keinerlei Vernetzungsmittel verwendet. Diacoll bietet eine sehr gute Verträglichkeit und es sind keinerlei erkennbare Risiken von Fremdkörperreaktionen bekannt.

### *Anwendung*

Den Blister öffnen und Diacoll mit trockenem Instrument entnehmen. Das weiche, schwammartige und leicht anpassbare Vlies kann auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Diacoll mit Hilfe eines Tupfers oder einer Kompresse auf die Blutung drücken und darauf belassen. Danach den Verband wie gewohnt anlegen. Diacoll fällt entweder beim Entfernen des Verbandes von alleine ab oder wird – falls noch fest verklebt – etwas angefeuchtet und danach vorsichtig abgenommen.



**Diacoll**  
Art.-Nr. 0202K  
PZN 225 545 4  
VE = 12 Stück

Vertrieb durch:

**BREU GmbH**  
Dialysebedarf



Innstraße 12  
85640 Putzbrunn

Tel 089 / 74140620  
Fax 089 / 7192186

info@breugmbh.com  
www.breugmbh.com